


# Fornisce una protezione supplementare quando utilizzato con tecnologia Hydrofiber®


ConvaMax™ può essere utilizzato come medicazione primaria o secondaria. Quando è necessaria una medicazione primaria supplementare, è compatibile con medicazioni Hydrofiber® come AQUACEL™; EXTRA™. L'essudato può essere trasferito attraverso lo strato di Hydrofiber® ed essere assorbito da ConvaMax™, fornendo una combinazione di uno strato avanzato di contatto con la ferita e di alta capacità di assorbimento.

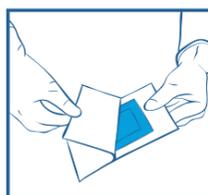

Dopo che la ferita è stata pulita, scegliere la misura appropriata di ConvaMax™ in modo da lasciare spazio sufficiente dal bordo della ferita.



Le medicazioni ConvaMax™ Superabsorber Non-Adesiva o Adesiva possono essere utilizzate sia come medicazione primaria che come medicazione secondaria. Quando viene utilizzato come medicazione primaria, ConvaMax™ Superabsorber Non-Adesiva o Adesiva deve essere in stretto contatto con il letto della ferita per garantire l'assorbimento del fluido della ferita. Lo strato bianco deve essere a contatto con la cute e lo strato blu impermeabile deve essere posizionato lontano dal corpo.

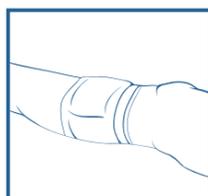

ConvaMax™ Superabsorber può essere usato con il bendaggio di ritenzione, nastri o bendaggio di compressione, se valutato come clinicamente appropriato.

Misura della Medicazione	N° pezzi per Conf.	Codice Prodotto
<b>ConvaMax™ Superabsorber Non-Adesivo</b>		
7,5cm x 7,5cm	3,0in x 3,0in	10 422566
10cm x 10cm	3,9in x 3,9in	10 422567
10cm x 20cm	3,9in x 7,9in	10 422568
12,5cm x 12,5cm	4,9in x 4,9in	10 422569
15cm x 15cm	5,9in x 5,9in	10 422570
15cm x 20cm	5,9in x 7,9in	10 422571
20cm x 20cm	7,9in x 7,9in	10 422572
20cm x 30cm	7,9in x 11,8in	10 422573
20cm x 40cm	7,9in x 15,7in	10 422574
<b>ConvaMax™ Superabsorber Adesivo</b>		
7,5cm x 7,5cm	3,0in x 3,0in	10 422575
10cm x 10cm	3,9in x 3,9in	10 422576
10cm x 20cm	3,9in x 7,9in	10 422577
15cm x 15cm	5,9in x 5,9in	10 422579
15cm x 20cm	5,9in x 7,9in	10 422580
20cm x 20cm	7,9in x 7,9in	10 422581

1. World Union of Wound Healing Societies (2019) Consensus Document. Wound exudate: effective assessment and management Wounds International. Available at: [www.woundsinternational.com](http://www.woundsinternational.com) 2. Cutting KF, White R (2002) Maceration of the skin and wound bed: its nature and causes. J Wound Care 11(7): 275-8 3. World Union of Wound Healing Societies (2007) Principles of best practice: wound exudate and the role of dressings. A consensus document. London: MEP Ltd. Available at: [www.woundsinternational.com](http://www.woundsinternational.com)

Per ulteriori informazioni sulla medicazione ConvaMax™ Superabsorber di ConvaTec o richiedere una visita dal rappresentante di zona di ConvaTec.

800.930.930 (IT)  
[www.convatec.it](http://www.convatec.it)



# ConvaMax™ SUPERABSORBER

**NOVITÀ**

## GESTIONE DELL'ESSUDATO. CUTE PROTETTA.<sup>1</sup>



**MEDICAZIONE SUPER ASSORBENTE  
ADESIVA E NON - ADESIVA**



CONFORMABILITÀ



MORBIDEZZA



ALTA ASSORBENZA



ALTA RITENZIONE




ConvaMax™ Superabsorber gestisce l'essudato in modo efficace mantenendo l'integrità della cute e supportando la guarigione<sup>1</sup>



# La sfida dell'eccesso di essudato

Per una completa guarigione della ferita, è necessario che vi sia essudato. L'essudato previene l'essiccamento del letto della ferita, aiuta la migrazione delle cellule riparatrici di tessuti, fornisce nutrienti essenziali per il metabolismo cellulare e aiuta la distacco dei tessuti morti o danneggiati.<sup>1-3</sup>

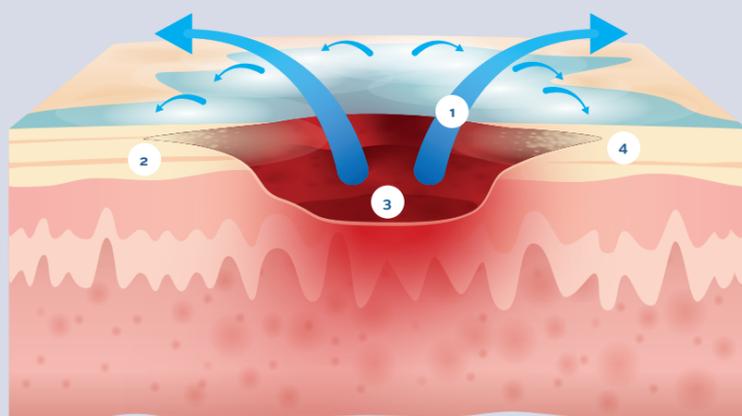

1. Essudato
2. Epidermide
3. Regione della ferita
4. Area peri-lesionale danneggiabile dall'essudato

Tuttavia, l'eccesso di essudato della ferita può causare una serie di problemi per la salute generale della zona peri-lesionale e della cute circostante.

**L'eccesso di essudato può compromettere l'integrità della cute e ritardare o impedire la guarigione delle ferite.**



Immagini utilizzate con il gentile permesso dei proprietari.



## Problemi riscontrabili dai medici:<sup>3</sup>

- Macerazione ed erosione della cute peri-lesionale
- Perdite di essudato attraverso il bendaggio secondario, che porta un aumentato del rischio di infezione
- Frequenti visite dei pazienti e cambi della medicazione, aumentando il carico di lavoro e i costi di medicazione
- La ferita diventa statica attraverso una gestione dell'essudato inefficace



## Problemi riscontrabili dai pazienti:<sup>3</sup>

- Perdite che sporcano gli indumenti o la biancheria da letto, causando disagio
- Cattivo odore
- Effetti psicosociali, come imbarazzo, vergogna o ansia correlati alla ferita
- Medicazioni che cadono perchè saturate
- Dolore durante l'applicazione o la rimozione

# Trovare una medicazione adatta alla sfida

Creare un ottimo ambiente per la guarigione della ferita, richiede una medicazione che può aiutare a proteggere la ferita contro i danneggiamenti provocati da un eccessivo essudato e mantenendo l'integrità della cute.

## La soluzione all'eccessivo essudato: ConvaMax™

ConvaTec™ offre oltre 25 anni di esperienza nella cura delle ferite e i suoi prodotti sono ritenuti affidabili da professionisti del settore in tutto il mondo.



### Alto assorbimento di liquidi, anche sotto compressione\*

L'essudato nelle ferite croniche può essere corrosivo per il letto ferita e per la cute intatta. ConvaMax™ assorbe alti livelli di essudato nel nucleo superassorbente (SAP) (fino a 177g/100cm<sup>2</sup>), bloccandolo lontano dalla ferita e contribuendo a promuovere l'integrità della cute.<sup>2</sup>



### Alta ritenzione di liquidi e batteri\*

Una volta che l'essudato è stato assorbito, ConvaMax™ mantiene il fluido all'interno del nucleo SAP, assicurandosi che non viene rilasciato alla ferita o al bendaggio



### Modulazione delle Proteasi<sup>†1</sup>

È stato dimostrato in vitro che ConvaMax™ non solo assorbe le MMP, ma le lega anche. Questo riduce le MMP in eccesso all'interno dell'ambiente della ferita per promuovere la guarigione.



### Morbido e Flessibile\*

È morbido sulla cute, facile da applicare e facile da rimuovere per la soddisfazione del paziente. Lo strato di protezione blu mantiene la conformabilità. Scegliendo una medicazione che gestisce efficacemente il livello di essudato della ferita può comportare un tempo di utilizzo prolungato, producendo un impatto positivo su sprechi e costi, oltre che aiutare con la guarigione.<sup>1</sup>



### Una scelta per ogni Ferita\*

Scelta di una gamma completa di dimensioni per adattarsi a qualsiasi tipo di ferita. Scegli tra versioni adesive o non adesive.

